

# Gebrauchsanleitung

## Augenspüllösung NaCl by PREVOR

### 1. WANN IST NaCl by PREVOR ANZUWENDEN ?

Die **Kochsalzlösung von PREVOR** dient als **Augenspülung zum Ausspülen von Fremdkörpern (Staub) ohne chemisches Risiko.**

### 2. WIE IST NaCl by PREVOR ANZUWENDEN?

Nach unten schauen. Die Augenminiwanne auf das Auge aufsetzen. Den Kopf nach hinten neigen. Sobald die Spüllösung das Lid bedeckt, das Auge öffnen und die Lösung leicht herausfließen lassen. Durch den erzeugten mechanischen Abspüleeffekt wird der Fremdkörper bzw. Staub entfernt. Die Wirksamkeit von NaCl by PREVOR ist optimal, wenn die Lösung abfließt und ein mechanischer Abspüleeffekt entsteht.

Spülen Sie alle Fremdkörper vollständig heraus, auch aus den Tränensäcken. Sollte nicht alle Fremdkörper entfernt sein, so suchen Sie einen Arzt auf.

NaCl by PREVOR ist pH-neutral und steril. Sie kann auch auf vorgeschädigter Hornhaut verwendet werden.

Gemäß Norm DIN EN 15154-4:2009-07

Empfohlene Anwendungstemperatur: 15-35°C.



### 3. WARNHINWEISE

#### Eine Spülung nach Kontakt mit Gefahrstoffen nie verzögern!

Wie alle Kochsalzlösungen, auch die pH-neutralen, ist deren Wirkung begrenzt auf das rein mechanische Abspülen. Daher ist diese Spülung nicht ausreichend bei Kontakt mit reizenden oder ätzenden Gefahrstoffen. In diesem Falle sollten die PREVIN®-oder HEXAFLUORINE®-Lösung als Erstmaßnahme verwendet werden. Im Anschluss ist ein Arzt aufzusuchen.

Falls diese aktiven Spüllösungen (PREVIN®-oder HEXAFLUORINE®-Lösung) nicht zur Verfügung stehen, kann man die Spülung mit der Kochsalzlösung beginnen, allerdings muss wie bei einer Wasserspülung mind. 15 Min. gespült werden, allerdings ohne Gewissheit, dass ausreichend gespült wurde.

Im Falle anhaltender Beschwerden oder des Zurückbleibens eines Fremdkörpers nach der Spülung ist ein Arzt aufzusuchen.

Nur zur einmaligen Anwendung geeignet, ansonsten besteht das Risiko der Verkeimung/Kontaminationsverschleppung.

#### Gegenanzeigen

Bisher sind keine Gegenanzeigen bekannt.

#### Hinweise zur Anwendung

Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.

### 4. UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Unerwünschte Wirkungen sind bisher nicht bekannt.

### 5. LAGERUNG

Es wird empfohlen, die Lösung keinen Frosttemperaturen auszusetzen, da sie als wässrige Lösung gefrieren kann und dann nicht mehr direkt verwendbar ist. Die Wirksamkeit der Lösung ist nach dem Auftauen nicht beeinträchtigt. Bei Beschädigung der Verpackung, der Flasche oder Augenminiwanne nicht benutzen.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN

Die NaCl-Lösung von PREVOR ist klassifiziert als Medizinprodukt der Klasse IIa. Die Lösung ist weder reizend noch Allergie auslösend.

PREVOR GmbH  
50670 Köln

Gereonshof 2A  
tel: 0221-337722-10

[www.prevor.com](http://www.prevor.com)



**PREVOR**

VORBEUGEN UND RETTEN

Forschungslabor Toxikologie & Umgang mit chemischen Risiken

**CE 0459**

