

Istruzioni per l'uso: DAPF

DAP / Soluzione Hexafluorine®:

Soluzione di lavaggio d'emergenza per schizzi di acido fluoridrico e derivati acidi sulla pelle.

Avete acquistato una doccia autonoma portatile (DAP) di soluzione Hexafluorine e la ringraziamo per la fiducia che dimostrate nei nostri prodotti.

Che cos'è la DAPF?

La DAPF è una doccia autonoma portatile contenente 5 litri di soluzione Hexafluorine®, destinata al lavaggio nel primo minuto di schizzi corporali di acido fluoridrico e dei suoi derivati acidi.

Principi di installazione e utilizzo della DAPF:

Grazie al suo contenuto di 5 litri di soluzione Hexafluorine, la DAP deve essere utilizzata come lavaggio cutaneo nei 60 secondi successivi all'incidente.

La DAPF deve quindi trovarsi in prossimità delle zone a rischio di schizzi di acido fluoridrico o dei suoi derivati acidi; può anche essere trasportata dagli operatori nel corso dei loro spostamenti.

Protocollo previsto per un'efficacia massima:

La DAPF è destinata a un primo lavaggio d'emergenza dell'intera superficie corporea.

La sua efficacia è dovuta alle proprietà attive della soluzione Hexafluorine.

In caso di incidente si raccomanda l'utilizzo di tutto il contenuto della doccia. La vittima dello schizzo deve svestirsi completamente per non favorire l'aumento del contatto tra la sostanza chimica e la pelle.

Raccomandazioni generali:

La DAPF deve essere utilizzata come prima soluzione e in prima intenzione. Un lavaggio iniziale con acqua ritarda l'applicazione e riduce l'efficacia della soluzione Hexafluorine a causa della perdita di tempo. Se non si dispone della soluzione Hexafluorine, non ritardare mai il lavaggio. Utilizzare piuttosto l'acqua.

Non superare la data limite d'utilizzo indicata sulla confezione.

La DAPF è dotata di un sistema che ne permette un unico utilizzo, destinato all'uso integrale del contenuto della DAPF in caso di schizzo esteso di sostanze chimiche.

Campo di efficacia e limiti noti della soluzione Hexafluorine®:

La soluzione Hexafluorine permette di arrestare la penetrazione della sostanza chimica e l'evoluzione delle lesioni da schizzi di acido fluoridrico e suoi derivati acidi; in caso di rischio diversificato (basi e acidi, ossido riduttori, solventi), raccomandiamo di utilizzare la soluzione Diphotérine®, una soluzione polivalente contro le proiezioni di qualsiasi tipo di sostanza chimica.

Cosa fare se la lesione è già comparsa o se si interviene oltre 60 secondi?

Oltre i 60 secondi, la lesione può già svilupparsi. Un lavaggio, anche su una lesione

già presente, migliorerà l'applicazione di cure secondarie. L'utilizzo della soluzione Hexafluorine® può risultare utile anche nei casi di lavaggio ritardato (oltre i 60 secondi). In questo caso, raccomandiamo di proseguire il lavaggio iniziale effettuato attraverso la DAP della soluzione Hexafluorine con un secondo lavaggio di una durata ideale pari a 3-5 volte il tempo di contatto. In seguito, può essere indicata l'applicazione di gluconato di calcio sulla zona contaminata a seconda del protocollo medico stabilito dal medico responsabile.

Cura e manutenzione:

La DAPF non richiede una conservazione particolare ma è consigliato non esporre il prodotto al gelo in quanto la soluzione acquosa può congelare e non essere quindi utilizzabile immediatamente. La soluzione Hexafluorine® non perde tuttavia di efficacia quando viene scongelata. La temperatura di utilizzo ideale è compresa tra 15 e 35 °C.

La DAPF deve essere sostituita alla data di scadenza riportata sull'etichetta.

Tossicologia:

La soluzione Hexafluorine non è irritante, allergizzante o tossica.



C€ 0459

